

MONTAGE-INSTRUCTIES

Bedpapegaai Comfort Lift



Bedding Group

Deze handleiding beschrijft de montage van de bedpapegaaibeugel op de Comfort Lift.


De bedpapegaaai kan niet worden gecombineerd met een hoofdbord.

Met behulp van deze beugel kan de bedpapegaaai zowel links achter als rechts achter op de Comfort Lift worden gemonteerd en komt de handgreep in het midden boven het bed te hangen.

Breng de liftpositie naar de laagste stand om veilig te kunnen werken.


Breng het verstelbare ruggedeelte naar de hoogste stand zodat het bovenste frame aan de hoofdzijde bereikbaar is.

Verwijder bout en bus aan beide zijden uit het frame (zie onderstaande foto).

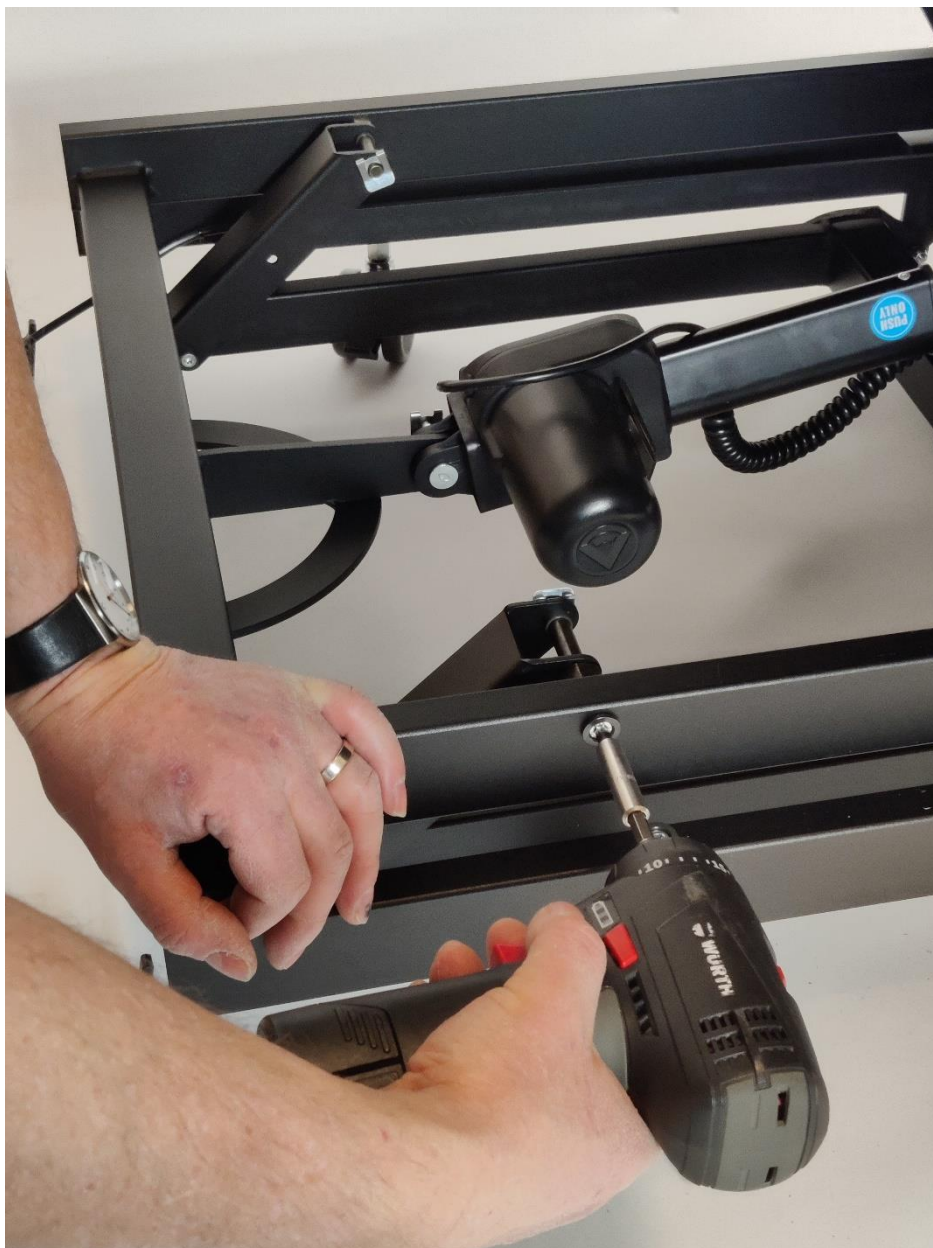

Schuif de beugel zo diep mogelijk in het frame.


Zorg ervoor dat de uitsparing (zie onderstaande foto) in de beugel links en rechts ter hoogte van de boutpositie aan beide kanten van het frame komt.

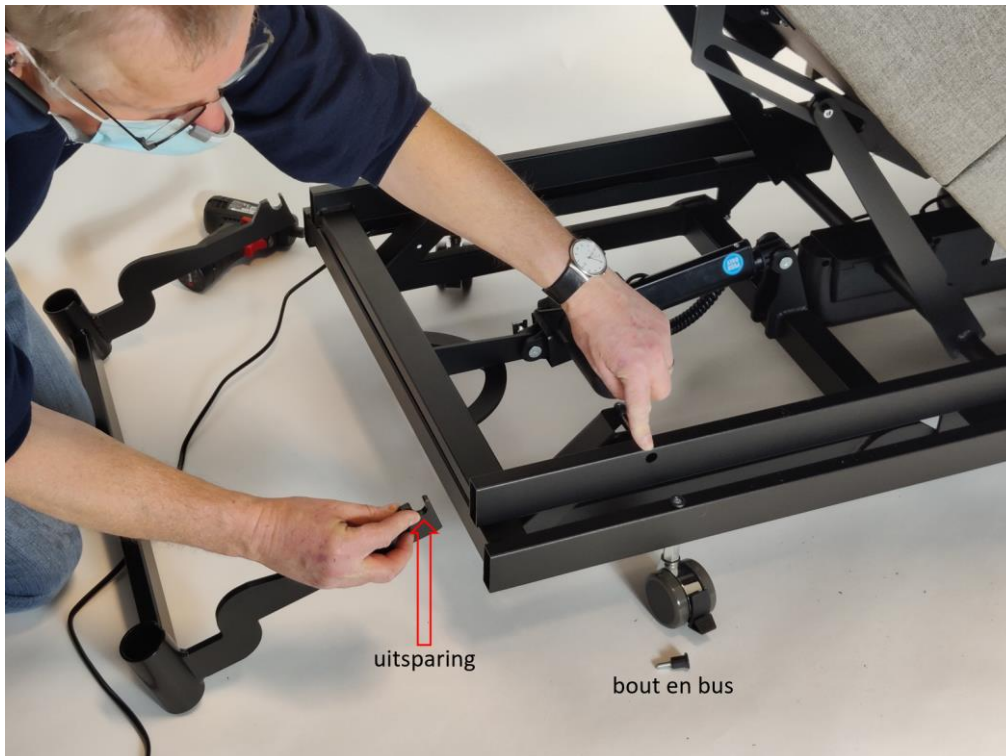

Plaats bout en bus terug aan beide kanten van het frame.



U kunt nu de bedpapegai naar keuze links of rechts plaatsen.

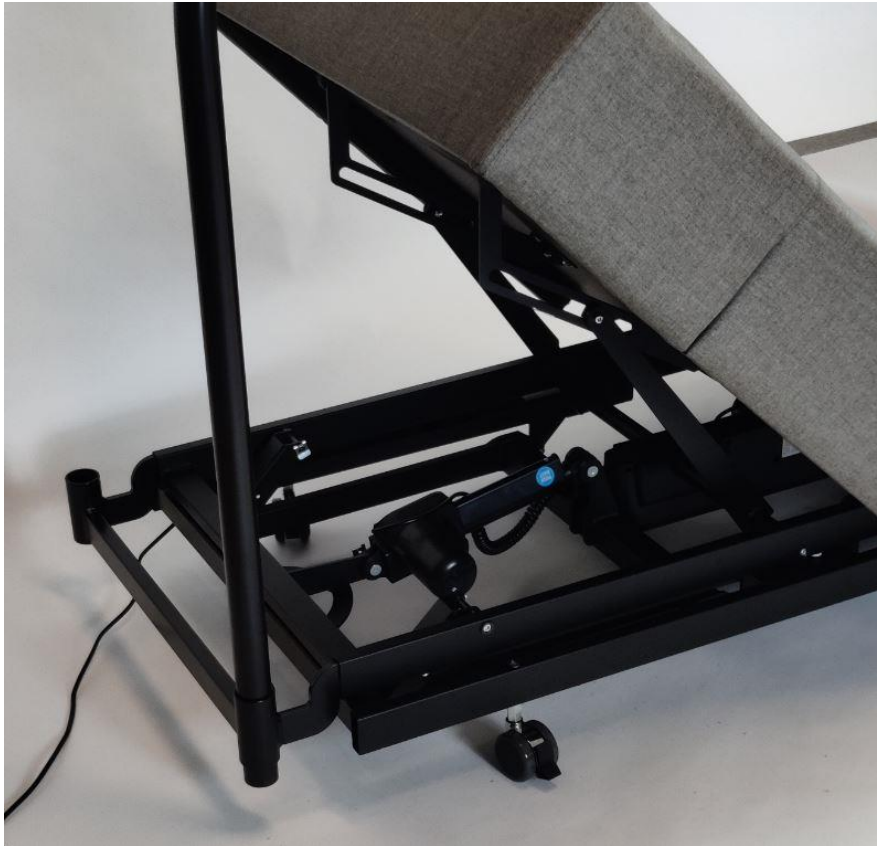

Bevestig nu het handvat aan de bedpapegai.



De bedpapegai zit in het bovenste frame van de Comfort Lift, dus beweegt mee met de box.